


Bedienungsanleitung ARTROMOT®-K1 Classic Knie-Mobilisationsgerät

Der Hauptschalter des Gerätes befindet sich neben dem Netzsteckereingang am Gerät.

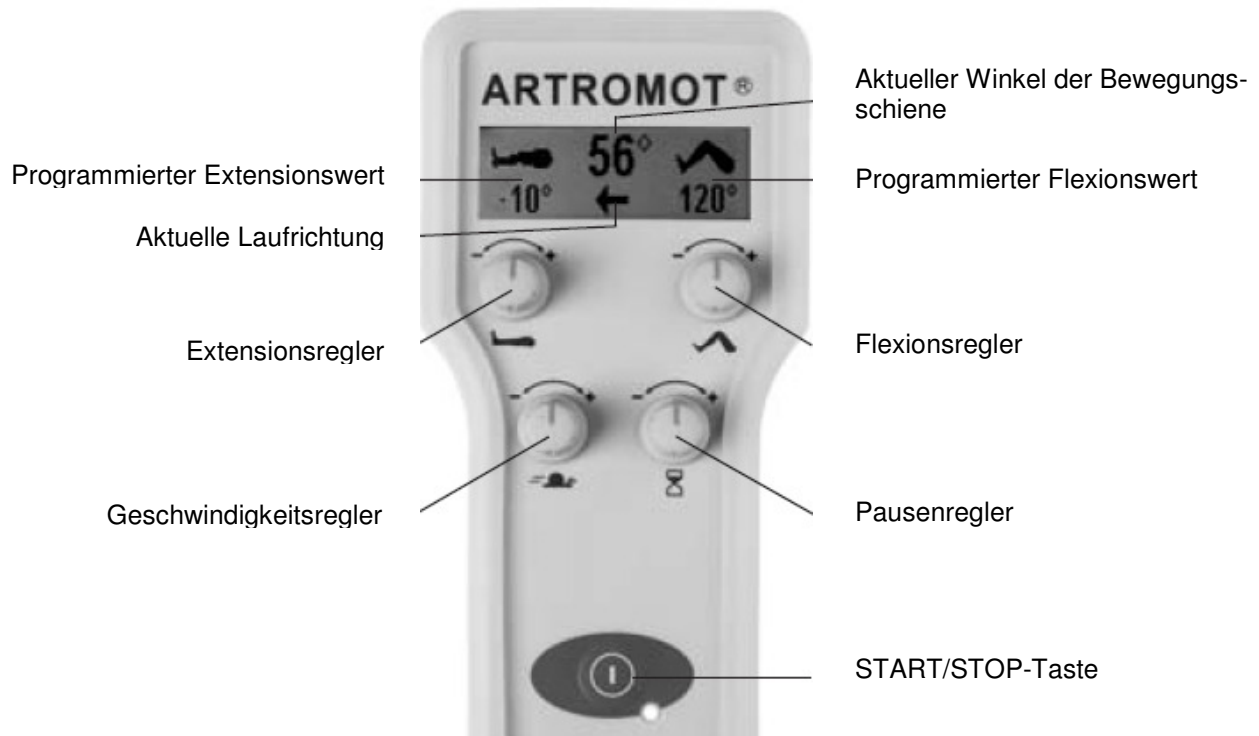

Programmieren der Einstellungen:

1. Um den Extensionswert einzustellen, den **Extensionsregler** herunterdrücken und gleichzeitig nach links oder rechts drehen. Die maximale Extension (Streckung) beträgt -10° .
2. Die Geschwindigkeit kann mittels **Geschwindigkeitsregler** eingestellt werden. Dazu den Regler herunterdrücken und nach links oder rechts drehen. Die Geschwindigkeit ist in 5% Schritten von 5% bis 100% wählbar.
3. Zum Einstellen des Flexionswertes den **Flexionsregler** herunterdrücken und gleichzeitig nach links oder rechts drehen. Die maximale Flexion (Beugung) beträgt 120° .
4. Die Funktion **PAUSE** ermöglicht das Verweilen an den eingestellten Beuge- und Streckpunkten für eine gewisse Zeit, bevor sich das Gerät wieder in Bewegung setzt. Um die Pausen einzustellen, den **Pausenregler** herunterdrücken und nach links oder rechts drehen. Die eingestellte Pausendauer gilt sowohl für die Streckung wie auch für die Beugung!

5. Um die Behandlung zu Beginnen, die **Taste START / STOP** drücken.
6. Durch das Drücken einer beliebigen Taste während der Therapie hält das Gerät sofort an. Um wieder zu starten, die **START / STOP-Taste** erneut drücken. Dabei wird die Richtung gewechselt, d.h. von Extension in Flexion und umgekehrt.

WICHTIG:

Die Kindersicherung wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die Regler EXTENSION und GESCHWINDIGKEIT gleichzeitig gedrückt werden!