



## Bedienungsanleitung ARTROMOT®-K1 Standard Knie-Mobilisationsgerät

Der Hauptschalter des Gerätes befindet sich neben dem Netzsteckereingang am Gerät.

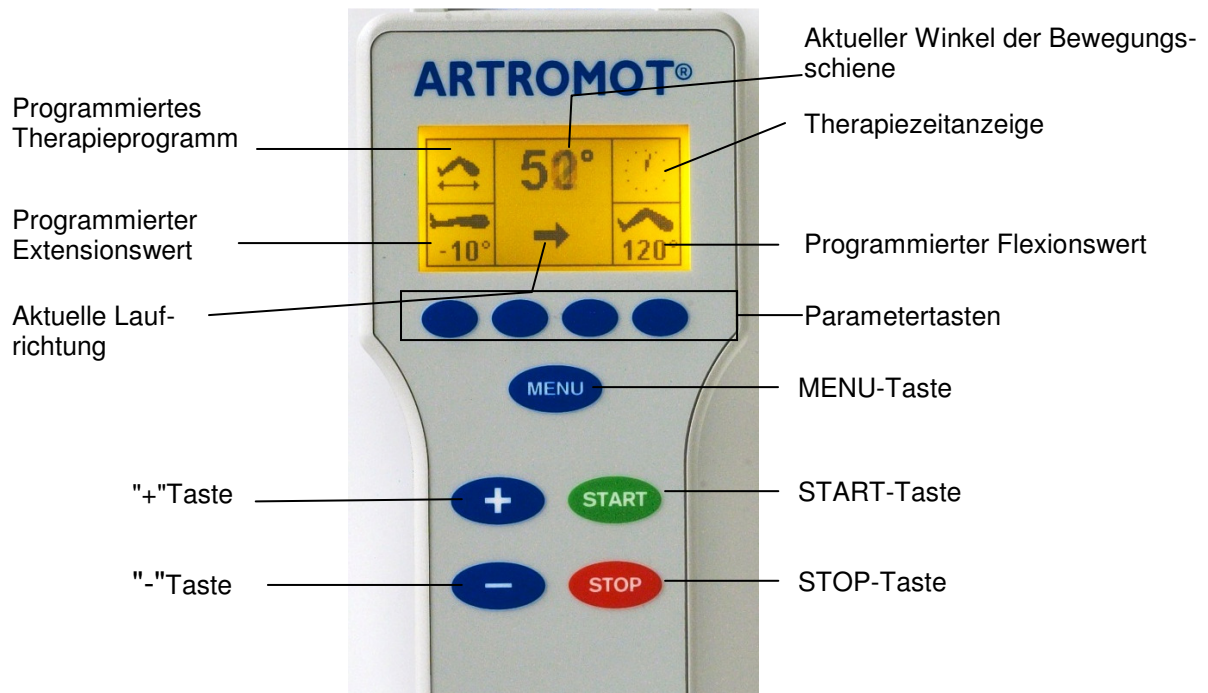


### Programmieren der Einstellungen:

1. **MENU-Taste** drücken, im Display erscheint unterhalb des aktuellen Winkels die Programmierenebene **M1**.
2. Mit der **Parameter Taste** den Parameter **Extension** auswählen.
3. Mittels  **"+"** und  **"-"** Taste Extension (Streckung) einstellen. Die maximale Knieextension beträgt  $-10^\circ$ .
4. Den Parameter **Geschwindigkeit** wählen und ebenso einstellen. Die Geschwindigkeit ist in 5% Schritten von 5% bis 100% wählbar.
5. Mittels Parameter **Aufwärmprogramm** und der  **"+"** Taste wählen, ob das Aufwärmprogramm eingeschaltet werden soll. Dadurch wird der Patient aus der Mitte der eingestellten Grenzwerte für Extension und Flexion heraus langsam an diese heran geführt. Das Aufwärmprogramm ist standardmässig deaktiviert.

6. Die **Flexion**  analog der Extension einstellen, die maximale Knieflexion beträgt 120°.
7. Mittels **Taste STOP** Programmiermodus beenden.
8. Durch die **Taste START** wird die Therapie gestartet.
9. Durch das Drücken einer beliebigen Taste während der Therapie hält das Gerät sofort an. Um wieder zu starten, drücken Sie die **START-Taste**. Dabei wird jedoch die Richtung gewechselt, d.h. von Extension in Flexion und umgekehrt.

**WICHTIG:**  
Die Kindersicherung wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt werden!

### MENU-Auswahlmodus

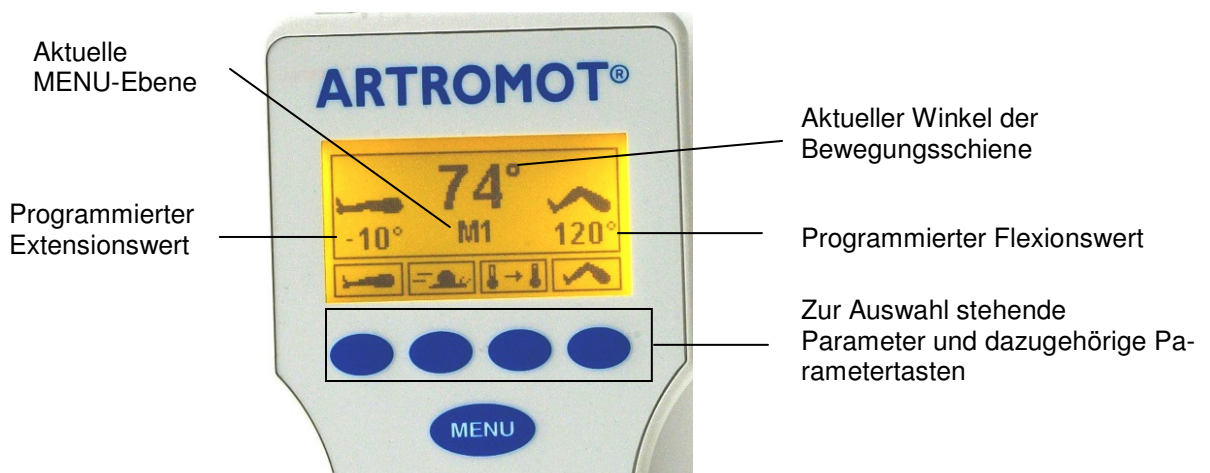

### Programmiermodus

