


Bedienungsanleitung ARTROMOT®-SP3 Sprunggelenk

Der Hauptschalter des Gerätes befindet sich neben dem Netzsteckereingang.


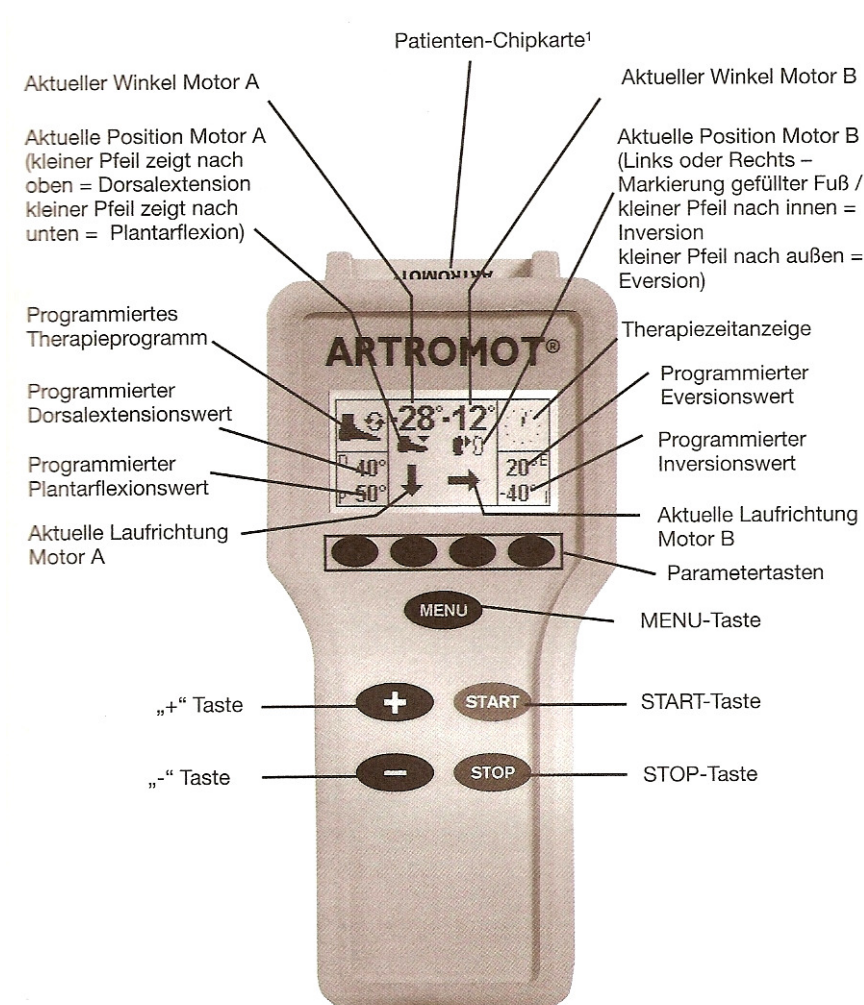


Nomenklatur der Bewegungen

Dorsalextension (Aufwärts-
Bewegung) ,max 40°

0°

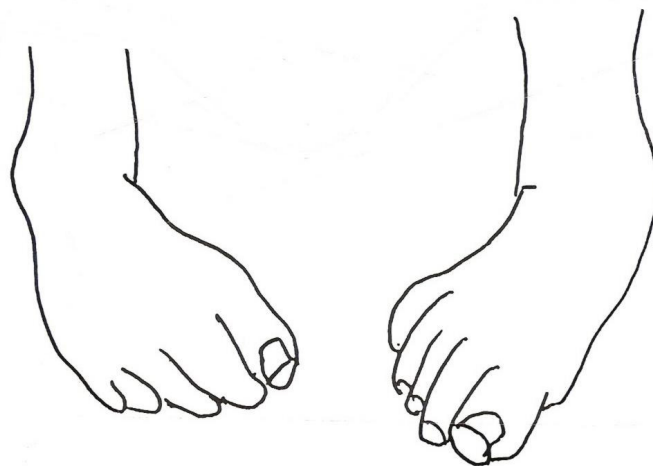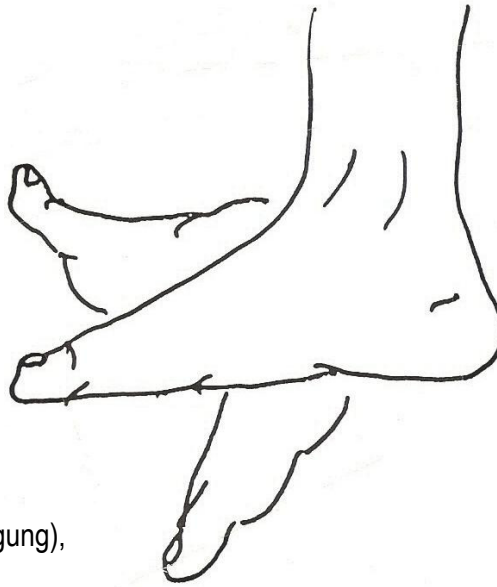

Plantarflexion (Abwärtsbewegung),
max. -50°



Inversion (Einwärtsbe-
Wegung, max. -40°

Eversion (Auswärts-
bewegung, max. 20°

Einstellung der Aufwärts- (Dorsalextension) und der Abwärtsbewegung (Plantarflexion)

1. **MENU-Taste** drücken, im Display erscheint unterhalb des Winkels die Programmierenebene **M1**.
2. Mit der Parametertaste den Parameter **Dorsalextension**  auswählen. Mittels „+“ und „-“, **Taste** kann der gewünschte Wert eingestellt werden.
3. Mit der Parametertaste **Plantarflexion**  wählen und ebenso einstellen.
4. Erneut die Parametertaste drücken, um in die Programmierenebene **M2** zu gelangen. Den Parameter Geschwindigkeit wählen und mit „+“ und „-“, **Tasten** anpassen. Die Geschwindigkeit ist in 5% Schritten von 5% bis 100% wählbar.
5. Durch Drücken der **STOP-Taste** werden die eingegebenen Werte gespeichert.
6. Durch die Taste **START** wird die Therapie gestartet. Das Gerät fährt in die Mitte der eingestellten Winkel und hält automatisch an.
7. Durch erneutes Drücken der **START-Taste** bewegt sich das Gerät innerhalb des eingestellten Bewegungsbereiches.

Zu beachten: Die Differenz zwischen der Dorsalextension und der Plantarflexion muss mindestens 5° betragen, ansonsten erscheint im Display der Hinweis „DIFF“.

Achtung:

Durch Drücken der **STOP-Taste** während der Therapie hält das Gerät sofort an. Um wieder zu starten, drücken Sie die **START-Taste**. Dabei fährt das Gerät wieder in die Mitte der eingestellten Winkel und hält wieder an. Erneut die **START-Taste** drücken, die Therapie wird fortgesetzt.


WICHTIG:

Die Kindersicherung wird ein- bzw. ausgeschaltet, indem die Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt werden!

Einstellung der Einwärts- (Inversion) und Auswärtsbewegung (Eversion) kombiniert mit der Aufwärts- (Dorsalextension) und Abwärtsbewegung (Plantarflexion)

Einstellen Motor B

Menu-Taste 3 Mal drücken, um in die Programmierenebene **M3** zu gelangen.

Mit der rechten Parametertaste( B) anwählen. Durch erneutes Drücken den Motor B aktivieren.

Mittels Drücken der Menü Taste wieder in die Menü Ebene **M1** gelangen.

Bitte Reihenfolge beachten!

1. Parametertaste Dorsalextension drücken Mittels „+“ und „-“, **Taste** kann der gewünschte Wert eingestellt werden.
2. Parametertaste Plantarflexion drücken Mittels „+“ und „-“, **Taste** kann der gewünschte Wert eingestellt werden.
3. Parametertaste Eversion drücken Mittels „+“ und „-“, **Taste** kann der gewünschte Wert eingestellt werden.
4. Parametertaste Inversion drücken Mittels „+“ und „-“, **Taste** kann der gewünschte Wert eingestellt werden.
5. Durch Drücken der **STOP-Taste** werden die eingegebenen Werte gespeichert.
6. Durch die Taste **START** wird die Therapie gestartet. Das Gerät fährt in die Mitte der eingestellten Winkel und hält automatisch an.
7. Durch erneutes Drücken der **START-Taste** bewegt sich das Gerät innerhalb des eingestellten Bewegungsbereiches.

Zu beachten: Die Differenz zwischen der Dorsalextension und Plantarflexion und zwischen Inversion und Eversion muss mindestens 5° betragen, ansonsten erscheint im Display der Hinweis „DIFF“.

WICHTIG:

In Notfällen kann durch Drücken einer beliebigen Taste die Behandlung unterbrochen und das Gerät gestoppt werden!