

# Pflege und Rücksendung

Das Gerät nur mit einem feuchten Tuch abwischen.



Nie unter fließendem Wasser oder mit Chemikalien reinigen!

Das Gerät nicht fallen lassen oder beschädigen.

Der Akku darf nicht geladen oder manipuliert werden.

Kabel kann bei falscher Geräte-Anwendung eine Stolperfalle darstellen.

Gerät immer ausserhalb der Reichweite von Kindern und immer im Koffer aufbewahren.




Nach Therapie-Abschluss umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren, um die Rücksendung zu koordinieren (Zusatzkosten bei später Rücksendung).  
Transportkarton für die Rücksendung aufbewahren.

## Vermietungspartner:

Lüdi Medical Rehab AG  
Hans Huber-Strasse 38  
4502 Solothurn  
www.luedimedical.ch

## Bei Fragen:

 032/626 30 90  
Mo - Fr 08:00 - 12:00 und  
13:30 - 17:30 Uhr  
service@luedimedical.ch



## Gebrauchsanweisung

Die beiliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

EC REP

MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H  
21521 Wohltorf, Deutschland

Inverkehrbringer:  
Effectum Medical AG  
www.effectummedical.com



**u**sana**medical**  
www.usamedical.com



## Bewegungsschiene Hall-U-Sana®

### Quick Guide Deutsch

Version V3  
9. November 2024  
HA-500.301 Hall-U-Sana Quick Guide\_DE\_V3  
Artikel-Nr. HA-500.301



Anwendungsvideo


# Einstellung der Bewegungsschiene

Behandlung nur sitzend durchführen!



**ACHTUNG:** das Gerät nicht bewegen.  
Gerät muss flach auf dem Boden liegen.  
Therapiebeginn frühestens 2 Wochen nach der Operation.

## 1 Korrektes Platzieren des Fusses

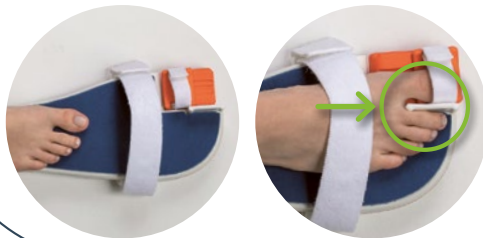

Fuss bis an den weissen Anschlag schieben: die Zehenfalte muss gut im Kontakt mit dem senkrechten Zehentrenner (Anschlag) sein.

## 2 Fixierung des Fusses mittels Ristband



Ristband über dem Fuss anziehen und mit Klettverschluss fixieren.

## 3 Befestigung der Grosszehe auf der Zehenklappe



Grosszehe locker auf den Zehengleiter (Schlitten) legen, Zehengleiter so weit wie möglich nach hinten ziehen, Zehe mit dem Band fixieren.

# Therapie

Während 30 Tagen 2 x täglich morgens und abends je 25 Min. therapieren.  
Es gibt zwei vordefinierte Programme:

**1 Programm 1: kleinere Auslenkung der Zehenklappe**  
Empfehlung: Die ersten vier bis fünf Therapietage dieses Programm wählen.



**2 Programm 2: grössere Auslenkung der Zehenklappe**  
Ab fünftem Tag und nur wenn keine Schmerzen wählen. Bei Schmerzen: Programm 2 stoppen und weiterhin Programm 1 benutzen.



# Bedienelemente

Anzeige Status und verbleibende Behandlungsdauer in Minuten

START PAUSE-Taste: zum Ein- & Ausschalten sowie zum Starten & Pausieren eines Programms



Anzeige Akku-Ladung Falls umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren.

Tasten zur Direktwahl von Programm 1 oder Programm 2

# Ablauf

**1. Einschalten**  
Die START PAUSE-Taste 2 Sek. gedrückt halten.



**4. Not-Aus bei Schmerzen**  
Sofort kurz die START PAUSE-Taste drücken.

**2. Programmwahl**  
Beim Einschalten ist immer Programm 1 vorgewählt (1) (leuchtet grün)  
Um Programm 2 zu wählen, Taste (2) kurz drücken (wird dann grün).

**5. Ausschalten**  
Die START PAUSE-Taste 2 Sek. gedrückt halten.

**3. Gewähltes Programm starten**  
START PAUSE-Taste kurz drücken.

**Fehlermeldung**  
Fehler-Code notieren, Gerät ausschalten und umgehend Lüdi Medical Rehab AG kontaktieren.

