

# Entretien et retour

hallusana®

Essuyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide.



Ne jamais nettoyer sous l'eau courante ou avec des produits chimiques !

Ne pas laisser tomber ni endommager l'appareil.

La batterie ne doit pas être chargée ou manipulée.

En cas d'utilisation incorrecte de l'appareil, le câble peut présenter un risque de trébuchement.

Conserver l'appareil hors de portée des enfants et toujours dans la mallette.



Lorsque le traitement est terminé, contacter immédiatement Lüdi Medical Rehab AG pour organiser le retour de l'appareil (frais supplémentaires éventuels en cas de retard).


Conserver le carton de transport pour le retour.

## Partenaire de location :

Lüdi Medical Rehab AG  
Hans Huber-Strasse 38  
4502 Solothurn

[www.luedimedical.ch](http://www.luedimedical.ch)

## En cas de questions :

 032/626 30 90  
Lun – Ven 8h00 – 12h00  
13h30 – 17h30

[service@luedimedical.ch](mailto:service@luedimedical.ch)



## Mode d'emploi

Lire attentivement le mode d'emploi ci-joint.

EC REP

MED-RAS GmbH, Eichenallee 8H  
21521 Wohltorf, Allemagne

Fabricant légal  
Effectum Medical AG  
[www.effectummedical.com](http://www.effectummedical.com)



**u**sana**medical**  
[www.usamedical.com](http://www.usamedical.com)



## Attelle de mobilisation Hall-U-Sana®

## Guide rapide Français

Version V3  
9 novembre 2024  
HA-500.302 Hall-U-Sana\_Guide\_rapide\_FR\_V3  
Réf. HA-500.302



Vidéo explicative

# Configuration de l'attelle de mobilisation

Effectuer le traitement en position assise uniquement !


**ATTENTION** : ne pas bouger l'appareil.

L'appareil doit reposer à plat sur le sol.

Début du traitement au plus tôt 2 semaines après une intervention chirurgicale.



## 1 Positionnement correct du pied

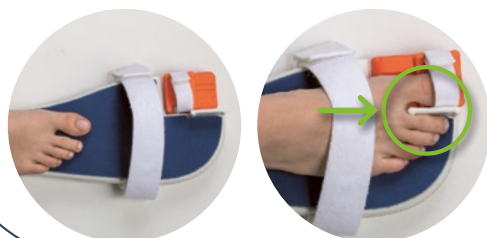

Avancer le pied jusqu'à la butée blanche : le pli entre les orteils doit être en contact étroit avec le séparateur du gros orteil (butée verticale).

## 2 Fixation du pied à l'aide de la sangle de pied



Tirer sur la sangle pour la fixer sur le pied et attacher avec la fermeture velcro.

## 3 Fixation du gros orteil sur le support mobile



Poser sans forcer le gros orteil sur le support coulissant (glissière), reculer le support coulissant au maximum, attacher le gros orteil avec la sangle.

# Traitement

Traiter 25 minutes 2 fois/jour, matin et soir, pendant 30 jours.

Deux programmes prédéfinis :

### 1 Programme 1 : faible amplitude du support mobile

Recommandation : sélectionner ce programme les 4 à 5 premiers jours du traitement.



### 2 Programme 2 : grande amplitude du support mobile

Sélectionner à partir du 5e jour et uniquement en l'absence de douleurs. En cas de douleurs : arrêter le programme 2 et recommencer à utiliser le programme 1.




# Interface utilisateur

Affichage de l'état et de la durée de traitement restante en minutes

Touche START PAUSE : pour allumer et éteindre l'appareil et pour démarrer ou interrompre un programme



Indication de la charge de la batterie. Si  contacter immédiatement Lüdi Medical Rehab AG.

Touches de sélection du programme 1 ou 2


# Procédure


1. **Allumer** Appuyer pendant 2 secondes sur la touche START PAUSE.



4. **Arrêt d'urgence en cas de douleurs** Appuyer aussitôt brèvement sur la touche START PAUSE.

## 2. Sélection du programme

Lors de la mise sous tension, le programme 1 est toujours sélectionné  (lumière verte).

Pour le programme 2, appuyer brèvement sur la touche  (qui devient verte).

3. **Démarrer le programme choisi** Appuyer brièvement sur la touche START PAUSE.

## 5. Éteindre

Appuyer pendant 2 secondes sur la touche START PAUSE.



## Message d'erreur

Noter le code, éteindre l'appareil et contacter immédiatement Lüdi Medical Rehab AG.